

Dentalrapid[®] SD

wipes



Alkoholische Desinfektionstücher GEBRAUCHSFERTIG



Ihre Vorteile:

- ▶ Schnelle Einwirkzeiten
- ▶ Erweitertes Wirkungsspektrum
- ▶ **Begrenzt viruzid PLUS**
- ▶ Tränk-Tuchsystem getestet
- ▶ Vier-Felder Test
- ▶ Einfache Dokumentation

Präparate-Typ:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher in speziellen fusselfreien Vliesqualitäten (s. Lieferformen) mit verfestigten Fasern in unterschiedlichen Formaten und Applikationsformen. Alle Tuch-Tränksysteme sind mit dem Vier-Felder-Test (EN 16615) getestet und entsprechend als eigenständiges Produkt VAH-gelistet. Die eingesetzte Tränkflüssigkeit Dentalrapid SD liquid ist ebenfalls VAH gelistet.

Anwendungsgebiet:

Gemäß MPG: Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biozid Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen.

Anwendungshinweise:

Tuch-Tränksystem mit Spenderbehälter:

Dentalrapid SD wipes S / M / XL

Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und je nach Typ in den dafür vorgesehenen, aufbereiteten Spenderbehälter (Universalspender Dose für S/ Universalspenderbehälter Dispenser Cube für XL u. M) stellen. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Flächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung abwischen und einwirken lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem trockenen Einmaltuch nachwischen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (für Acrylglas nicht geeignet). Behälter nach Tuchentnahme immer sofort sorgfältig und dicht verschließen. Nach dem Öffnen des Beutels für 28 Tage im Spenderbehälter verwendbar.

Dokumentation der Tuch-Tränksysteme:

Dentalrapid SD wipes M und XL

Das Lift & Sticketikett komplett vom Beutel abziehen, auf den Behälter (Eimer) kleben und das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum (+ 28 Tage) eintragen.

Dentalrapid SD wipes S und L

Bei der kleinsten Tuchvariante Dentalrapid SD wipes S gibt es kein Lift & Sticketikett. Hier wird das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum (+ 28 Tage) auf dem Etikett des Dosenbehälters eingetragen. Bei Dentalrapid SD wipes L erfolgt die Dokumentation direkt auf dem Etikett des Flowpacks.

Aufbereitungshinweise:

Die Aufbereitung des Universalspenderbehälter (Dose oder Dispenser Cube) ist mit einem geeigneten Desinfektionstuch /-mittel durchzuführen, z.B. Dentalrapid soft SD Liquid. Bei der Anwendung sind geeignete Handschuhe (z. B. aus Nitrilkautschuk) zu tragen. Bei Dentalrapid SD wipes L entfällt dieser Vorgang.



- 1) Universalspenderbehälter öffnen!
- 2) Behälter inkl. Deckel innen und außen desinfizieren (Einwirkzeit beachten)!
- 3) Trocknen lassen!
- 4) Neuen Beutel aufschneiden und in den Behälter platzieren, Tuch durch den Deckelführen und fest verschließen.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), begrenzt viruzid gegenüber behüllten Viren wie z.B. SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV und wirksam gegenüber Adeno-, Noro- und Rota-Viren (**begrenzt viruzid PLUS**).

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697
(hohe Belastung): Konz. 1 Min.

Levurozid (Candida albicans) nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.

TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.

Behüllte Viren (z. B. SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV) gemäß EN 14476 DVV/2012 mit hoher Belastung: Konz. 1 Min.

Adeno-, Noro-, Rota-Viren
(EN 14476, hohe Belastung): Konz. 1 Min.

Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher):
nach EN 16615 und den Anforderungen der VAH,
Stand: 02.04.2015
(hohe Belastung):* Konz. 2 Min.

*(Tuch-Tränksystem, Listung für 5 Min. in der VAH-Liste)

Zusammensetzung:

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 43,0 g Ethanol; 8,0 g 1-Propanol; 0,055 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Besondere Hinweise /Sicherheitshinweise:





H 228 Entzündbarer Feststoff. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 25° C. Ausbringung max. 50 ml pro m². Die aus-gebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml je m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten.

Entsorgungshinweise:











Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.

Detergenzien VO 648/2004/EG (Tränkflüssigkeit): Enthält: < 5% kationische Tenside, Duftstoffe.

Tuchqualitäten & Formate

Produkttyp	Format	Qualität
Dentalrapid SD wipes	 12 x 20 cm	23 g / m ²
Dentalrapid SD wipes	 23 x 15 cm	50 g / m ²
Dentalrapid SD wipes	 20 x 30 cm	50 g / m ²
Dentalrapid SD wipes	 28 x 30 cm	50 g / m ²

Lieferformen:

Gebindegröße / Inhalt	Format	VE	REF
Dentalrapid SD wipes, lemon, refill bag, 100 Tücher		12	71510100
Dentalrapid SD wipes, lemon, 2 Rollen à 240Tücher		1	71510240
Dentalrapid SD wipes, lemon, Flowpack, 80 Tücher		6	71510080
Dentalrapid SD wipes, (neutral) 2 Rollen à 90 Tücher		1	71500090
Dentalrapid SD wipes, (lemon) 2 Rollen à 90 Tücher	 	1	71510090
Dentalrapid SD wipes, (fruit) 2 Rollen à 90 Tücher	 	1	71520090
Dentalrapid SD wipes, (flower) 2 Rollen à 90 Tücher	 	1	71530090

Passend dazu empfohlen:

Produkt:	VE	REF
Unversalspenderbehälter Dispenser cube, leer	1	701005012
Unversalspenderbehälter Dispenser box, Leerdose	1	701000100



Haltbarkeit: 3 ½ Jahre ab Herstellungsdatum

Kontakt:

Weitere Informationen über Gutachten / Testergebnisse sowie über das Gesamt-Hygieneprogramm erhalten Sie auf Anfrage.
Tel.: +49 (0) 2266 4742 - 0
E-Mail: info@mueller-omicron.de

A Quality Brand from

Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Schlosserstr. 1

D-51789 Lindlar

Tel.: +49 (0) 2266 4742-0

Fax: +49 (0) 2266 4742-23

www.mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.com