



# Dentosuc weekly AC pur

## Absauganlagenreiniger KONZENTRAT

### Ihre Vorteile:

- ▶ Schaumarmes Reinigungskonzentrat
- ▶ Sehr gute Reinigungsleistung
- ▶ Gute Materialverträglichkeit
- ▶ Vorbeugende Wirkung gegen Verstopfung

### Präparate-Typ:

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung.

### Anwendungsgebiete:

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst.

### Anwendungshinweis:

Der Spezialreiniger wird bei Problemfällen als 10 %ige Lösung angewendet (100 ml / 1 L Wasser). Die Einwirkzeit liegt bei 1 – 2 Stunden. Bei regelmäßiger Anwendung wird der Reiniger als 5 %ige Lösung (50 ml / 1 L Wasser) 1 - 2 mal wöchentlich für 30 Min. einwirken gelassen. 2 Liter der Gebrauchslösung werden über die Saugschläuche durchgesaugt und nach der Einwirkzeit wird die Anlage mit einem Liter Wasser gespült.

### Zusammensetzung:

- < 5 % amphotere Tenside
- < 5 % Phosphonate

### Chemisch-physikalische Daten:

- ▶ Aussehen: transparent
- ▶ Dichte: 1,2 g / cm<sup>3</sup>
- ▶ pH-Wert bei 20° C: < 2

### Anwendungskonzentration:

Gebrauchslösung	5,0 %	10,0 %
1 Liter	50 ml	100 ml
2 Liter	100 ml	200 ml
3 Liter	150 ml	300 ml
5 Liter	250 ml	500 ml
10 Liter	500 ml	1000 ml

**Besondere Hinweise / Sicherheitshinweise:**

H 319 Verursacht schwere Augenreizung. Nach Handhabung gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlicher Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Detergenzien VO 648/2004/EG:> 5 % amphotere Tenside, > 5 % Phosphonate

**Lieferformen:**

Gebindegröße	REF
2 L Flasche	75102000

**Passend dazu empfohlen:**

Produkt	REF
1 L Universaldosierflasche, leer	701001000



**Haltbarkeit:**

3 ½ Jahre ab Herstellungsdatum.

**Kontakt:**

Weitere Informationen über Gutachten / Testergebnisse sowie über das Gesamt-Hygieneprogramm erhalten Sie auf Anfrage.  
 Tel.: +49 (0) 2266 47 42 – 0  
 E-Mail: [info@mueller-omicron.de](mailto:info@mueller-omicron.de)

**A Quality Brand from**

Müller-Omicron GmbH & Co. KG  
 Schlosserstr. 1  
 D-51789 Lindlar  
 Tel.: +49 (0) 2266 4742-0  
 Fax: +49 (0) 2266 4742-23  
[www.mueller-omicron.de](http://www.mueller-omicron.de)  
[www.mueller-omicron.com](http://www.mueller-omicron.com)