



Gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektion für Flächen

Dentalrapid[®] SD
soft liquid
alkoholfrei

CE
0481

Ihre Vorteile:

- ▶ Schnelle Einwirkzeiten
- ▶ Breites Wirkungsspektrum
- ▶ Materialschonend
- ▶ Gute Materialkompatibilität
- ▶ Remanenzwirkung

Anwendungsgebiete:

Aldehyd- und phenolfreies Desinfektionsmittel für den professionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, mit hervorragender Reinigungswirkung, angenehmem Duft, großem Wirkungsspektrum, schnellen Einwirkzeiten und einer Remanenzwirkung.

Art der Anwendung: Gemäß MPG:

Alkoholfreie Flächendesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.

Gemäß Biozid-Richtlinie:

Alkoholfreie Flächendesinfektion zur Desinfektion von Flächen. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.

Anwendungshinweise:

Die Flächendesinfektion wird als Schaum aufgebracht. Die gebrauchsfertige Lösung wird unverdünnt aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm als Schaum auf die zu desinfizierende Fläche aufgebracht und mit einem fusselfreien, ungefärbtem

Einmaltuch gleichmäßig verteilt und einwirken gelassen. Auf vollständige Benetzung achten. Überschüssige Präparatmenge ggf. mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden. Die Desinfektionslösung darf nur zum Tränken von mit der Lösung kompatiblen Tüchern nach EN 16615 verwendet werden.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 16615; levurozid (Candida albicans) nach VAH, EN 13624, EN 1650, EN 16615; "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV), Rota-Viren nach RKI/DVV, Noro-Viren nach EN 14476.

Einwirkzeiten der Tränkflüssigkeit:

Bakterien nach EN 13727, EN 1276 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans nach EN 13624, EN 1650 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) gemäß RKI / DVV mit hoher Belastung: Konz. 1 min. Rota-Viren nach DVV mit Belastung: Konz. 1 min. Noro-Viren nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz. 30 min.

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach VAH mit Mechanik und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 min. Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH-Liste: Konz. 5 min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten: 0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid 0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid 0,24 g C12-14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethylammoniumchlorid

Chemisch-physikalische Daten:

- ▶ Dichte: 0,911 g / ml
- ▶ pH-Wert: 6,0 - 10,0

Besondere Hinweise:

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen. VO 648 / 2004 / EG: Enthält < 5 % kationische Tenside, Duftstoffe.

Umweltinformationen:

Alle Desinfektionsmittel von Müller-Omicron werden unter strengsten Qualitätsmaßstäben und umweltschonenden Produktionsverfahren hergestellt.

Nationale / Internationale Testnormen:

Dentalrapid soft SD liquid erfüllt nachfolgende nationale und internationale Testnormen: EN 1650, EN 13624, EN 1276, VAH, EN 13697, EN 13727, EN 16615, EN 14476. DGHM Standardmethode Fläche (geringe Belastung / mit und ohne Wischen), Behüllte Viren (RKI / DVV).

Lieferformen:

Gebindegröße	REF
500 ml Flasche	71200500
1 L Flasche	71201000
5 L Kanister	71205000

Haltbarkeit:

3½ Jahre ab Herstellungsdatum.

Zubehör/Dosierhilfen:

Produkttyp	REF
Handsprühkopf für 500 ml Flasche	701000903
Handsprühkopf für 1 L Flasche	701000910
Dosierpumpe für 5 L Kanister	701000912
Kanisterhahn für 5 L Kanister	701000911
Kanisterschlüssel	701000909

Kontakt:

Weitere Informationen über Gutachten / Testergebnisse sowie über das Gesamt-Hygieneprogramm erhalten Sie auf Anfrage.
Tel.: +49 (0) 2266 4742-0
E-Mail: info@mueller-omicron.de



Made in Germany by

Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Schlosserstr. 1
D-51789 Lindlar
Tel.: +49 (0) 2266 4742-0
Fax: +49 (0) 2266 474223
www.mueller-omicron.de
www.mueller-omicron.com