



## Mundspülbeckendesinfektion GEBRAUCHSFERTIG

Dentotol® MD  
liquid

CE  
0481

### Ihre Vorteile:

- ▶ Schnelle Einwirkzeiten
- ▶ Zuverlässige Reinigungsleistung
- ▶ Pflegewirkung

### Präparate-Typ:

Alkalisches Spezialpräparat, gebrauchsfertig, zur Reinigung und Desinfektion von Mundspülbecken.

### Anwendungsgebiete:

Die Mundspülbeckendesinfektion ist ein alkalisches Spezialpräparat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten.

Mundspülbeckendesinfektion Dentotol® MD liquid entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

### Anwendungshinweise:

Mundspülbeckendesinfektion Dentotol® MD liquid wird unverdünnt angewendet. Zum Öffnen den Sicherheitsverschluss an den glatten Flächen zusammendrücken und drehen. Das Mundspülbecken mit ca. 20 ml des Reinigers flächig befeuchten und kurz einwirken lassen, bzw. mit einem Schwamm oder einer Bürste verteilen. Nach mind. einer Minute Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Empfehlenswert ist die Anwendung nach jeder Verschmutzung.

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13697, VAH;  
levurozid (Candida albicans) nach EN 13697, VAH;  
tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348

### Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans nach EN 13697 und DGHM (mit Mechanik, niedrige Belastung):  
Konz. 1 Min.

TbB (M. terrae) nach EN 14348  
(niedrige Belastung):

Konz. 1 Min.

### Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten:  
25,0 g Ethanol, 1,0 g Bis(3-aminopropyl)dodecylamin

### Chemisch-physikalische Daten:

- ▶ Aussehen: transparent
- ▶ Dichte: 0,964 g / ml
- ▶ pH-Wert: ca. 11,5



**Besondere Hinweise / Sicherheitshinweise:**

H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

**Entsorgungshinweis:**

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**Lieferformen:**

Gebindegröße	Neutral REF
750 ml	75210750

**Haltbarkeit:**

3 ½ Jahre ab Herstellungsdatum.

**Kontakt:**

Weitere Informationen über Gutachten / Testergebnisse sowie über das Gesamt-Hygieneprogramm erhalten Sie auf Anfrage.  
Tel.: +49 (0) 2266 47 42 - 0  
E-Mail: [info@mueller-omicron.de](mailto:info@mueller-omicron.de)



**Made in Germany by**

Müller-Omicron GmbH & Co. KG  
Schlosserstr. 1  
D-51789 Lindlar  
Tel.: +49 (0) 2266 47 42 - 0  
Fax: +49 (0) 2266 47 42 - 23  
[www.mueller-omicron.de](http://www.mueller-omicron.de)  
[www.mueller-omicron.com](http://www.mueller-omicron.com)

